



Lupa Somolia Digital 8242

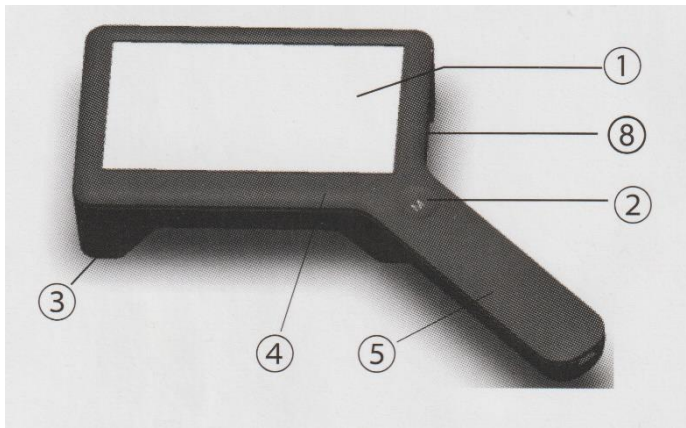

- 1) Pantalla
- 2) Botón de encendido y aumentos
- 3) Carcasa de Plástico
- 4) Cobertura plástica
- 5) Batería Integrada
- 6) LEDES (6 unidades)
- 7) Interruptor de encendido
- 8) Puerto USB C de carga

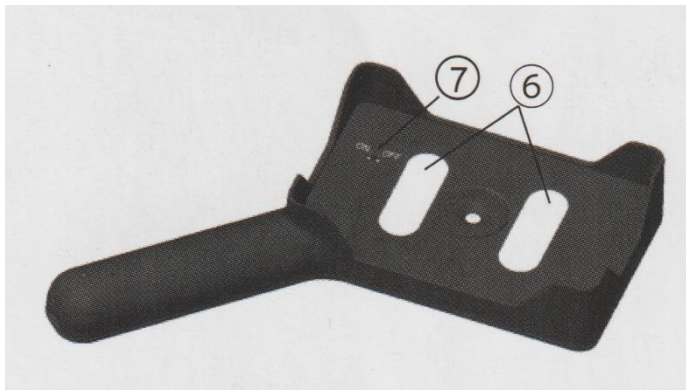

Características:

Tamaño de la pantalla 97x56mm (4.3")

Aumento: 3x / 5x / 10x

Iluminación: LEDES

Batería: 3.7V 1200 mAh

Tiempo de uso: 2h

Tamaño: 181x143x32mm

Peso: 145g (aprox)

Instrucciones de uso:

- 1) Encienda la lupa colocando el interruptor de encendido en on (7)
- 2) Localice el botón 2 y presione suavemente sobre la letra M.
 - a. La pantalla se encenderá
 - b. Hay tres posiciones de uso, a la primera pulsación, justo al encenderse empezará en 3x, al presionar el botón M una nueva vez, 5x y a la tercera, 10x
 - c. Presionando una cuarta vez, se apagará.

Precauciones:

No mire al sol o a fuentes intensas de luz con la lupa.

No apunte los LED hacia los ojos de otras personas o animales.

Evite dar golpes o acercar la lupa a fuentes intensas de calor.

No manipule la lupa con las manos mojadas.

Si se rompe la carcasa, no la manipule ni trate de desmontarla.